

Інструкція з використання

Розчин комплексний COMFORT LINE Ultra comfort, «HORIEN» - це комплексний розчин, який промиває, зволожує, дезінфікує, очищує, видаляє білкові відкладення і зберігає м'які контактні лінзи.

Склад :

Комплексний розчин - це стерильний, ізотонічний розчин, що містить ПГМБ (0,0001%), гідроксипропил метил целюлоза, гідрофільний поллоксамер, динатрію едетат (0,05%), хлорид натрію, борну кислоту, тетраборнокислий натрій.

Застосування :

- Відкрити кришечку флакону і видалити блакитну прокладку.
- Закрутити кришечку, наконечник кришечки проколе крапельний отвір, після чого розчин можна використовувати.
- Додайте 3-4 краплі розчину до кожного боку контактної лінзи і легенько протріть пальцями упродовж 10 секунд.
- Промийте кожну контактну лінзу з обох боків по 5 секунд для видалення залишків на їх поверхні.
- Покладіть контактні лінзи у контейнер, наповнений свіжим розчином, щонайменше на 6 годин.
- Видаліть розчин із контейнеру і промийте його новим розчином.
- Після використання закрутіть кришечку, наконечник зафіксує кришечку для зберігання розчину у стерильному стані.
- Якщо лінзи не використовуються упродовж тривалого періоду, поновлюйте розчин кожні 7 днів.

Запобіжні заходи :

- Не використовуйте, якщо герметична закрутка флакону пошкоджена або розчин протікає.
- Закривайте флакон після кожного використання.
- Ніколи не торкайтесь краєм флакону та будь-яких поверхонь з метою запобігання зараження розчину.
- Уникати впливу прямих сонячних променів.
- Не змішуйте розчини з ідентичними продуктами.

При будь-яких проблемах звертайтеся до свого лікаря-офтальмолога.

Термін зберігання закритого розчину становить 3 роки. Щойно флакон відкрито, через три місяці необхідно позбутися будь-яких залишків розчину. Зберігайте при кімнатній температурі 15-30° С в місці, не доступному для дітей. Дотримуйтесь вказівок вашого лікаря-офтальмолога щодо використання розчину. При необережному застосуванні із контактними лінзами може спричинити серйозні пошкодження і хвороби.

Протипоказання :Не використовувати розчин при алергії на будь-який компонент.

Побічні реакції і побічні ефекти: Не виявлено.

Застереження :

- Для щоденного зберігання контактних лінз регулярно поновлюйте розчин.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності.
- Ніколи не використовуйте водопровідну воду або іншу не стерильну воду для догляду за контактними лінзами, оскільки можливе мікробне забруднення, що може призвести до проблем з очима.

Термін придатності : 3 роки

Термін придатності у відкритому вигляді : 3 місяця

КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ :

Розчин комплексний COMFORT LINE Ultra comfort, «HORIEN» доступний у флаконах: 60мл, 120мл, 240мл, 360мл та 500 мл.

Уповноважений представник в Україні :

ТОВ «КОМФОРТ-ЛАЙН-ЮКРЕЙН» 49022, Україна , м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд.10, квартира 32, тел. 0 800 330 297 ; cl_ukraine@ua.fm

Дата останнього перегляду : 08/04/2021р.



HAICHANG CONTACT LENS CO., LTD.


No.1 Danfu Road, Situ Town, Danyang City, Jiangsu PR, China 212331

Tel.: 0086-0511-86208855 fax: 0086-0511-86206366

ХАЙЧАНГ КОНТАКТ ЛЕНС КО., ЛТД.

No.1 Данфу Род, Сіту Таун, Даньянг Сіті, Цзянсу ПР, Китай 212331

Тел.: 0086-0511-86208855 факс: 0086-0511-86206366

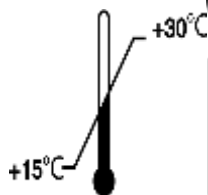

СТЕРИЛЬНО
STERILE A

